

FAQ - ZEISS Essential Line Vernetzungslösung

Für Augenärzte und Praxispersonal



Nr.	Frage	Antwort
Welche Workflowanforderungen habe ich ?		
1	Welche Möglichkeiten der Vernetzung bieten die Produkte der ZEISS Essential Line?	Die Produkte der ZEISS Essential Line bieten den Datenaustausch über eine Netzwerk- oder eine serielle Schnittstelle.
2	Passt sich die ZEISS Essential Line in meinen Praxisworkflow ein?	Sie können die Geräte der ZEISS Essential Line an einem einzelnen Arzt-Arbeitsplatz oder in einem speziellen Voruntersuchungsbereich in Ihrer Praxis einsetzen. ZEISS bietet Optionen zur Vernetzung von Basisdiagnostikgeräten und deren Integration in Ihren Praxisworkflow unabhängig von Patientenaufkommen und Standort.
3	Unterstützt die ZEISS Essential Line einen papierlosen Workflow?	Ja. Alle Geräte der Essential Line sind mit einer Schnittstelle für die elektronische Datenverwaltung ausgestattet. Sie können entweder Ihre elektronische Patientenakte, ihr ophthalmologisches Bildarchivierungssystem oder ZEISS FORUM als zentrale Datenbank nutzen.
4	Ich besitze bereits einige Voruntersuchungsgeräte. Wie passt sich die ZEISS Essential in meinen Gerätebestand ein?	Die Geräte der Essential Line können kombiniert werden, wie es für Ihre Praxis sinnvoll ist, und ergänzen Ihre bereits vorhandenen Geräte. Die Anbindung an die elektronische Patientenakte oder das Bildarchivierungssystem kann jedoch nur für die Geräte der ZEISS Essential Line angeboten werden.

Nr.	Frage	Antwort
Ist eine Anbindung an die elektronische Patientenakte/das Bildarchivierungssystem möglich?		
5	Wie lassen sich ZEISS Essential Line Geräte an EMR-/PACS-Systeme anbinden?	ZEISS bietet sowohl die serielle Datenübertragung, als auch die Netzwerkintegration. Alle Geräte verfügen über ein klar definiertes serielles Ausgabeprotokoll für den Export in die elektronische Patientenakte sowie eine DICOM-Schnittstelle für ophthalmologische Bildarchivierungssysteme. Die elektronische Patientenakte muss die betreffende Geräteschnittstelle unterstützen bzw. DICOM-konform sein.
6	Wie finde ich heraus, ob die Geräte der ZEISS Essential Line sich an das EMR-/PACS-System meiner Praxis anbinden lassen?	Lassen Sie Ihrem Anbieter für die elektronische Patientenakte eine Liste der ZEISS Essential Line Geräte zukommen, für die Sie sich interessieren. Die Schnittstellen für die ZEISS Essential Line sind frei verfügbar. Alle Informationen dazu können im Bereich für Software-Entwickler auf dieser Webseite heruntergeladen werden. ZEISS berät Systemanbieter zudem bei der Schnittstellen-Integration.
7	Welche Möglichkeiten habe ich, um die Geräte an die elektronische Patientenakte anzubinden?	ZEISS bietet eine große Auswahl an Möglichkeiten, je nachdem, ob Sie einfach nur Untersuchungsergebnisse speichern möchten, bei Voruntersuchungsgeräten lieber mit Patientenarbeitslisten arbeiten oder Daten verarbeiten möchten, z. B. um Ihren Refraktionsworkflow zu beschleunigen. Wenn Sie das Formular auf der Kontaktseite ausfüllen, wird sich ein regionaler ZEISS Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihren Bedarf zu besprechen.

Nr.	Frage	Antwort
Welches sind die nächsten Schritte?		
8	An wen muss ich mich wenden, um zu prüfen, ob sich die Essential Line Geräte an meine elektronische Patientenakte anbinden lassen?	Die erste Anlaufstelle für die Prüfung, ob die Essential Line Geräte direkt mit Ihrem Praxis-Datenbanksystem kompatibel sind und welche Schritte zur Anbindung erforderlich sind, ist Ihr Vertragspartner für die elektronische Patientenakte.
9	Welche weiteren Informationen benötige ich?	Schnittstellenbeschreibungen für alle Geräte der ZEISS Essential Line können von dieser Webseite heruntergeladen werden. Leiten Sie diese Informationen zusammen mit einer Angabe der Sie interessierenden ZEISS Geräte an Ihren System-Anbieter weiter.
10	Kann ZEISS mich unterstützen und meinen System-Anbieter direkt kontaktieren?	Ja. Füllen Sie bitte das Kontaktformular auf dieser Webseite aus. Wenn Sie die Kontaktdaten Ihres System-Anbieters angeben und die Sie interessierenden Geräte auflisten, werden wir selbst mit Ihrem System-Anbieter Kontakt aufnehmen und ihm alle Informationen zur Verfügung stellen, die für die Integration der ZEISS Essential Line Geräte benötigt werden.

Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland

Tel: +49 (0) 3641 220 333
Fax: +49 (0) 3641 220 112
Email: info.meditec@zeiss.com
Internet: www.zeiss.de/med

FAQ – Essential Line Vernetzungslösung
Für Augenärzte und Praxispersonal
Änderungen vorbehalten